

Onderhoud van turbines

Na elk gebruik

- Ontkoppel de turbine van de luchtslang.
- Verwijder mogelijke externe weefselresten.
- Verwijder de boor en controleer hem op slijtage (indien er groeven op de stift te zien zijn, kan u de boor best weggoien).
- Afspoelen onder lopend water (gedemineraliseerd water wordt aangeraden).
- Vervolgens drogen met een pluisvrije doek en perslucht.
- Indien de handleiding het vermeldt, mag de turbine in de thermodesinfector (hiervoor bestaan speciale rekken en opzetstukken).




Desinfecteren

De buitenzijde desinfecteren met een alcoholdoekje (bijvoorbeeld met Meliseptol of EuroSept Max Wipes).



Smeren

- Kort doorspuiten via het op één na grootste gat aan de onderzijde van de turbine.
- Plaats het handstuk op de koppeling, monteer een boor en laat de turbine enkele seconden functioneren.
- Vervolgens de turbine verwijderen van de luchtslang en de boor demonteren.

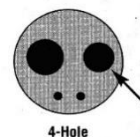

Steriliseren

- Uitsluitend in de autoclaaf.
- De turbine verpakken in sterilisatielaminaat.
- Autoclaveren op 134°C in een vacuüm B autoclaaf.
- Na het proces, een datum van 6 maanden verder noteren en bewaren in een stofvrije kast.

